

# GN Hearing Tuner


**Styr din hörupplevelse efter personliga önskemål direkt från din telefon.**



Appen är utvecklad för Beltone Silk hörapparater med Smart Hearing teknologi.


För att ladda ner appen i App Store (till iPhone och andra Apple-enheter) eller Google play för Samsung Galaxy (Android), sök efter "GN Hearing Tuner". Vänd på bladet för information om hur du parkopplar din telefon med dina hörapparater.

GN Hearing Tuner appen har två huvudskärmar, Volymkontroll och Programval. Du kan enkelt svepa från en skärmen till den andra, eller använda navigeringsknapparna. Det finns även en huvudmeny som ger möjlighet till ytterligare funktioner i appen. Såhär används några av funktionerna:

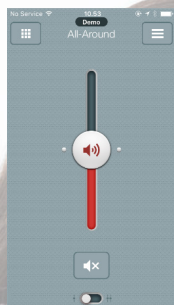


## Volymkontroll

Reglera volymen genom att dra volymreglaget upp och ner.

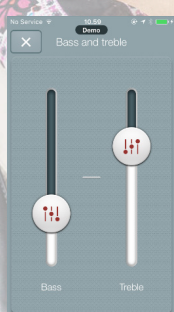


## Justera bas och diskant

Justera bas och diskant genom att dra reglagen upp och ner. Justeringen gäller även för streamat ljud.

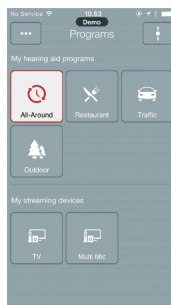

## Programval

Tryck på de olika knapparna för att välja olika hörapparatsprogram. Varje program har sin egen ikon.

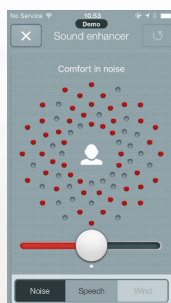

## Justera bullernivå


Möjlighet att reglera styrkan på bakgrunds ljud och buller.

# GN Hearing Tuner



## Röstfokus

Genom att ändra bredden på strålen kan du välja vad du vill lyssna på.

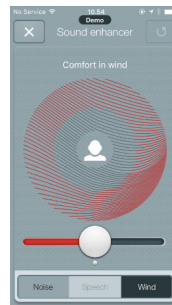

## Komfort i vindbrus

Reducera vindbrus för maximal komfort.

Dessutom finns funktioner för att spara inställningar som favoriter, hitta borttappade apparater, justera funktion för tinnituslindring (om den är aktiverad av din audionom)

**Så här parkopplas Apple enhet till GN Hörapparat** (iPhone 5 och framåt samt iPad Air och framåt):

1. Kontrollera under Inställningar>Allmänt-Om-Version så du inte har en föråldrad iOS version. Versioner äldre än iOS 9 bör undvikas.
2. Slå på Bluetooth under Inställningar>Allmänt-Bluetooth.
3. Välj Inställningar>Allmänt-Hjälpmedel-Hörapparater.
4. Slå på hörapparaterna (använd nya batterier) genom att stänga batterifacket. Hörapparaterna hamnar då i visningsläge.
5. När hörapparatmodell eller namn kommer upp på Appleenhet, klicka på texten för Parkopplingsförfrågan klicka Parkoppla (1 gång för en hörapparat. 2 ggr för två hörapparater).
6. Lyssna på hörapparaterna (6 st tydliga tonstötter ska höras i varje hörapparat).
7. Fortsätt lyssna på hörapparaterna. Först när en avslutande liten melodi höras i båda hörapparaterna är parkopplingen klar.
8. Nu är hörapparater och Appleenhet länkade.

## Samsung Galaxy 4S-6S och Note 4:

Kontrollera att du har minst Android version 5 (Lollipop), slå på bluetooth, öppna korrekt app nedan och följ instruktionerna.

OBSERVERA att Androidenheterna inte kan strömma ljud direkt från enhet till hörapparat, men kan kompletteras med Unite Telefonclip+ som är ett handsfree bluetooth-clip som överför ljudet från telefonen trådlöst.

Beltone.se